

# REVEASOL

## krém

### Zdravotnický prostředek

Příbalová informace pro uživatele – pozorně si ji přečtěte

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete krém Reveasol používat. TUTO PŘÍBALOVOU INFORMACI SI USCHOVEJTE! Obsahuje pro vás důležité informace. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně krému Reveasol, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo společnost EGIS Pharmaceuticals PLC.

#### 1. Co je Reveasol a k čemu se používá

Zdravotnický prostředek Reveasol je šedobílý krém bez obsahu steroidů určený k léčbě a prevenci symptomů psoriázy a dermatitidy

Reveasol obsahuje Ectoin®, přírodní molekulu chránící buňky, která má protizánětlivý účinek a stabilizuje jejich membránu.

Reveasol podporuje přirozené odstraňování odumřelých buněk z povrchu pokožky, a tím zmírňuje drsnost a ztvrdnutí ložisek psoriázy. Také zmírňuje tvorbu šupin, svědění a zarudnutí pokožky. Reveasol stabilizuje ochranný film pokožky a pomáhá normalizaci tvorby kožních buněk a času jejich zrání. Krém zvlhčuje pokožku a zabraňuje její další dehydrataci.

Reveasol zklidňuje podrážděnou a poškozenou pokožku a poskytuje jí úlevu tím, že snižuje zánětlivé reakce a napomáhá procesu regenerace.

#### 2. Upozornění a opatření

- Nepoužívejte krém na infikovanou pokožku.
- **Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.**
- Nepoužívejte krém déle než 6 měsíců po jeho otevření.

- Nepoužívejte krém, pokud jste přecitlivělý(á)/alergický(á) na Ectoin® nebo na kteroukoli další složku tohoto krému. V případě alergické reakce okamžitě přerušete jeho používání.
- Produkt může používat pouze jedna osoba.
- Produkt nanášejte pouze lokálně na postiženou pokožku.

#### 3. Co potřebujete vědět předtím, než použijete Reveasol

Nejsou známy žádné interakce mezi krémem Reveasol a jinými krémy, proto se jeho současné používání s jinými krémy nedoporučuje.

#### 4. Jak se Reveasol používá

Vždy používejte Reveasol přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud to Váš ošetřující lékař neurčil jinak, Reveasol jemně vmasírujte do postižených oblastí pokožky třikrát denně nebo tak často, jak je to nutné. Jestliže dojde během léčby ke zhoršení stavu pokožky, nebo se její stav nezlepší ani po dlouhodobé léčbě, léčbu přerušete a poraďte se se svým lékařem.

#### 5. Možné nežádoucí účinky krému Reveasol

Reveasol je dobře snášen. Dosud nejsou známy žádné pravidelně se vyskytující nebo přetrvávající nežádoucí účinky.

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout krátkodobé lokální pocity pálení, zarudnutí nebo svědění.

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky spojené s používáním krému Reveasol, informujte o tom svého lékaře, lékárníka nebo distributora výrobku. Pokud tyto projevy přetrvávají nebo se zhorší, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

155 x 210 mm

1 : 1

12 pt

CZ 289/580/21.04.21.

EGIS ID: CZ-11

● Pantone Black

Graphics version: v06

Auguszt Sz. - K.N. / 2021.10.04.

## 6. Jak uchovávat Reveasol

Datum expirace krému Reveasol je vytištěn jak na obalu, tak na samotném produktu. Reveasol se nesmí používat po vypršení doby expirace. Reveasol uchovávejte při teplotě mezi 2 °C a 25 °C.

## 7. Doplnující informace

V současnosti nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití krému Reveasol během těhotenství a kojení.

Před použitím se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

- jste těhotná nebo kojíte,
- si nejste jistá, zda nejste těhotná.

Reveasol je vhodný pro dlouhodobou léčbu/každodenní používání a je vhodný i pro citlivou pokožku. Neobsahuje barviva, aromatické ani konzervační látky.

Reveasol je vhodný pro děti a kojence.

Dětem a pacientům, kteří nejsou schopni používat Reveasol sami, je třeba pomoci s jeho nanášením.

## 8. Obsah balení krému Reveasol

30ml hliníková tuba

### Složení

Ectoin®, Aqua (voda), Cetearyl alkohol, Urea (močovina), Cetearyl isononanoát, Glycerin, olej ze semen Simmondsia Chinensis, Hydrogenovaný polydecén, Pentylénglykol, Hydroxyetylmočovina, Panthenol, Cetearyl glukoside, Lecitin, Alantoin, Xanthanová guma, Etylhexylglycerin, Laktát sodný, Cetearyl sulfát sodný, Triacetin.

## 9. Výrobce



bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten, Německo








## Distributor

Egis Pharmaceuticals PLC  
Keresztúri út 30-38.,  
1106 Budapešť, Maďarsko

Nahlaste jakoukoli událost týkající se produktu prostřednictvím [help@egis.hu](mailto:help@egis.hu)

## 10. Datum příbalové informace:

24.09.2021

	Označení CE s číslem oznámeného subjektu
	Výrobce
	Číslo šarže
 / EXP	Spotřebujte do
	Přečtěte si prosím příbalovou informaci pro uživatele
 2 °C - 25 °C	Uchovávat při teplotě
	Po otevření spotřebujte do