

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

HemaGel[®] PROCTO

Zdravotnický prostředek

**HemaGel[®]
PROCTO**

By VH Pharma a.s.



ČÍPKY

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ:

HemaGel[®] PROCTO je určen k podpoře hojení akutních i chronických ran sliznice konečníku u pacientů s fisurami a hemoroidy, včetně pacientů po Barronově ligatuře. Dále ke snížení krvácení u pacientů s indikací krvácivých hemoroidů a k odstranění nepříjemných pocitů (diskomfortu) zejména pálení a svědění v oblasti konečníku.

SLOŽENÍ:

HemaGel[®] PROCTO je bílý čípek torpédovitého tvaru obsahující práškový kopolymer HEMA-HAS a adeps solidus.

ČÍLOVÁ SKUPINA A OMEZENÍ POUŽITÍ:

Čípky jsou určeny pro dospělé pacienty. Před použitím u dětí nebo u těhotných a kojících žen se poraďte s lékařem.

Při onemocnění konečníku je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolicí. Je proto nutné pít dostatečně množství tekutin, jíst málo kořeněnou stravu a zvýšit příjem vlákniny.

JAK POSTUPOVAT PŘI POUŽITÍ ČÍPKU:

- Čípky se zavádějí do konečníku pokud možno po stolici a po omytí, zaobleným koncem do konečníku.
- V místě perforace oddělte z proužku 1 čípek, obal mírným tahem roztrhněte a čípek z něj vyjměte.
- Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do konečníku, nejlépe v mírném předklonu.
- Pokud lékař neurčí jinak, čípek **HemaGel[®] PROCTO** se zavádí jednou denně, nejlépe na noc.

KONTRAINDIKACE:

Přecitlivělost na některou ze složek produktu, nedostatečná délka rekta (u dětí do 3 měsíců věku nebo předčasně narozených dětí). Další kontraindikace jsou relativní a proto by mělo být užívání čípků v uvedených případech konzultováno s lékařem: zácpa, průjem, závažné onemocnění, masivní krvácení nebo poúrazový stav v oblasti konečníku a rekta, anorektální onemocnění jako absces nebo píštěl, abdominoperineální resekce.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků přerušte léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Chraňte před dětmi! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou expirací vraťte do lékárny.

Přípravek užívejte max. 30 dní. Doporučení výrobce: Nedoje-li do 7 dnů k ústupu obtíží nebo dojde-li k jejich zhoršení, poraďte se s lékařem. Čípek je určen pro jednorázové použití a aplikaci do konečníku. Neaplikujte do jiných tělních otvorů. Nepolykejte. U osob se zvýšenou citlivostí je možný výskyt lehkého svědění či pálení v konečníku, které není na závadu, ale mělo by být konzultováno s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ:

Skladujte v suchu, při teplotě 15 - 25 °C v původním vnitřním obalu.

BALENÍ:

Balení obsahuje 5, 10 nebo 15 čípků ve tvarované PVC/PE fólii.

DISTRIBUTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCE:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

INFORMÁCIE NA POUŽITIE. ČÍTAJTE POZORNE!

HemaGel[®] PROCTO

Zdravotnícka pomôcka

HemaGel[®]
PROCTO

By VH Pharma a.s.



ČAPÍKY

URČENÝ ÚČEL POUŽITIA:

HemaGel[®] PROCTO je určený na podporu hojenia akútnych aj chronických rán sliznice konečníka u pacientov s fisúrami a hemoroidy, vrátane pacientov po Barronovej ligatúre. Ďalej k zníženiu krvácania u pacientov s indikáciou krvácajúcich hemoroidov a na odstránenie neprijemných pocitov (diskomfortu) najmä pálenie a svrbenie v oblasti konečníka.

ZLOŽENIE:

HemaGel[®] PROCTO je biely čapík torpédového tvaru, obsahujúci práškový kopolymér HEMA HAS a adeps solidus.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Čapíky sú určené pre dospelých pacientov. Pred použitím u detí, tehotných žien a dojčiacich žien sa poraďte s lekárom. Pri ochorení konečníka je zvlášť dôležité dbať o hygienu a starať sa o pravidelnú stolicu. Je preto nutné piť dostatočné množstvo tekutín, jesť málo korenistú stravu a zvýšiť príjem vlákniny.

AKO POSTUPOVAŤ PRI POUŽITÍ ČAPÍKA:

- Čapíky sa zavádzajú do konečníka pokiaľ možno po stolici a po umytí, zaobleným koncom do konečníka.
- V mieste perforácie oddelíte z prúžku jeden čapík, obal miernym ťahom roztrhnite a čapík z neho vyberte.
- Zaobleným koncom napred ho zavedte hlboko do konečníka, najlepšie v miernom predklone.
- Ak lekár neurčí inak, čapík **HemaGel[®] PROCTO** sa zavádza raz denne, najlepšie na noc.

KONTRAINDIKÁCIE:

Precitlivenosť na niektorú zo zložiek produktu, nedostatočná dĺžka rekta (u detí do 3 mesiacov veku alebo predčasne narodených detí). Ďalšie kontraindikácie sú relatívne a preto by malo byť užívanie čapíkov v uvedených prípadoch konzultované s lekárom: zápcha, hnačka, závažné ochorenie, masívne krvácanie alebo poúrazový stav v oblasti konečníka a rekta, anorektálne ochorenie ako absces alebo fistula, abdominoperineálna resekcia.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu vedľajších nežiadúcich účinkov prerušte liečbu a kontaktujte ošetrojúceho lekára. Chráňte pred deťmi !! Nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby uvedenej na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nepoužitý prostriedok alebo prostriedok s uplynulou expiráciou vráťte do lekárne.

Prípravok užívajte max. 30 dní. Výrobca odporúča, ak nedôjde do 7 dní k ústupu ťažkostí alebo sa zhoršia, poraďte sa s lekárom. Čípek je určený na jednorazové použitie a aplikáciu do konečníka. Neaplikujte do iných telových otvorov. Neprehĺtajte. U osôb so zvýšenou citlivosťou je možný výskyt ľahkého svrbenie či pálenie v konečníku, ktoré nie je na závalu, ale malo by byť konzultované s lekárom.

SKLADOVANIE:

Uchovávať pri teplote 15 až 25°C v originálnom obale.

BALENIE:

Balenie obsahuje 5, 10 alebo 15 čapíkov v PVC/PE blistroch.

DISTRIBÚTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCA:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2022