

GLYCERINEX 2500

GLYCERÍNOVÉ ČÍPKY 2500 mg

Zdravotnický
prostředek



12 čípků po 2500 mg – pro dospělé a děti od 12 let

Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití!

GLYCERINEX 2500 je jednorázový zdravotnický prostředek ve formě čípků na bázi glycerolu, používaný k usnadnění vyprazdňování střev při zácpě.

Účinná složka: Glycerol.

Jak působí? Glycerol má mechanický projmavý účinek, založený na vtažení vody do stolice, které vede k jejímu zvlhčení a změkčení a následnému rozpočívání střev a vyprázdnění.

Indikace: GLYCERINEX 2500 se používá ke krátkodobé léčbě občasných zácp.

Kdy se nesmí používat? Nepoužívejte čípky k léčbě akutní bolesti břicha ani jiné bolesti neznámého původu.

Dávkování: Podle potřeby použijte 1–2 čípky za den.

Způsob použití: Vyjměte čípek z hliníkové fólie a zašpičatělým koncem napřed jej zcela zasuňte do konečníku. Pokud je čípek příliš měkký na zavedení, před vyjmutím z fólie jej ponořte na chvíli do studené vody, dokud nezíská pevnější konzistenci. Po zavedení čípku si umyjte ruce.

Uchovávání: Skladujte na suchém místě pro teplotách v rozmezí od 4 °C do 30 °C, mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte slunečnímu záření. Datum spotřeby je platné pouze pro správně skladovaný produkt v neporušeném obalu.

Varování: Určeno k jednorázovému použití. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti nebo alergie na nějakou z obsažených složek. V případě přetrvávající zácpy je důležité se poradit s lékařem a vyloučit jiné příčiny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemělo by se používat často a ne déle než 7 dní. Dlouhodobější užívání je možné na doporučení lékaře, který řádně posoudil Váš zdravotní stav. Při zácpě je nejprve vhodné upravit jídelníček a obohatit jej dostatečným množstvím vody a vlákniny. O použití výrobku během těhotenství či kojení se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. O použití během těhotenství a kojení nejsou k dispozici žádné studie.

Datum spotřeby: Datum spotřeby je uvedené na obalu. Nepoužívejte po překročení tohoto data.

Vysvětlení symbolů

	Zdravotnický prostředek		Składujte při teplotě v rozmezí 4 °C až 30 °C
	Číslo šarže		Nevyhazujte mimo nádoby určené ke sběru komunálního odpadu
	Jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně		Výrobce
	Datum spotřeby		Čtěte návod k použití



New.Fa.Dem. S.r.l.
Viale Ferrovie dello Stato, 1 – Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
Itálie

Distributor:
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,
Česká republika

Poslední revize návodu: 07/2022



GLYCERINEX 2500

GLYCERÍNOVÉ ČAPÍKY 2500 mg

Zdravotnícka
pomôčka
CE

12 čapíkov po 2500 mg – pre dospelých a deti od 12 rokov

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod k použitiu!

GLYCERINEX 2500 je jednorazová zdravotnícka pomôčka vo forme čapíkov na báze glycerolu, používaný na uľahčenie vyprázdňovania čriev pri zápche.

Účinná zložka: Glycerol.

Ako pôsobi? Glycerol má mechanický preháňavý účinok, založený na vťahovaní vody do stolice, ktoré vedie k jej zvlhčeniu a zmäkčeniu a následnému rozpochybovaniu čriev a vyprázdneniu.

Indikácie: GLYCERINEX 2500 sa používa na krátkodobú liečbu občasnej zápchy.

Kedy sa nesmie používať? Nepoužívajte čapíky na liečbu akútnej bolesti brucha ani iné bolesti neznámeho pôvodu.

Dávkovanie: Podľa potreby použite 1 – 2 čapíky za deň.


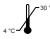





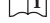
Spôsob použitia: Vyberte čapík z hliníkovej fólie a zašpicaťým koncom napred ho úplne zasuňte do konečníka. Pokiaľ je čapík príliš mäkký na zavedenie, pred vybratím z fólie ho ponorte na chvíľu do studenej vody, kým nezíska pevnejšiu konzistenciu. Po zavedení čapíka si umyte ruky.

Uchovávanie: Skladujte na suchom mieste pri teplotách v rozmedzí od 4 °C do 30 °C, mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavujte slnečnému žiareniu. Dátum spotreby je platný iba pre správne skladovaný produkt v neporušenom obale.

Varovanie: Určené na jednorazové použitie. Nepoužívajte v prípade precitlivenosti alebo alergie na nejakú z obsiahnutých zložiek. V prípade pretrvávajúcej zápchy je dôležité poradiť sa s lekárom a vylúčiť iné príčiny. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemalo by sa používať často a nie dlhšie ako 7 dní. Dlhodobejšie užívanie je možné na odporúčanie lekára, ktorý riadne posúdil Váš zdravotný stav. Pri zápche je najprv vhodné upraviť jedálniček a obohatiť ho dostatočným množstvom vody a vlákniny. O použití výrobku počas tehotenstva či dojčenia sa poraďte so svojim lekárom či lekárnikom. O použití počas tehotenstva a dojčenia nie sú k dispozícii žiadne štúdie.

Dátum spotreby: Dátum spotreby je uvedený na obale. Nepoužívajte po prekročení tohto dátumu.

Vysvetlenie symbolov

	Zdravotnícka pomôčka		Skladujte pri teplote v rozmedzí 4 °C až 30 °C
	Číslo šarže		Nevyhádzajte mimo nádoby určenej na zber komunálneho odpadu
	Jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane		Výrobca
	Dátum použiteľnosti		Čítajte návod na použitie



New.Fa.Dem. S.r.l.
Viale Ferrovie dello Stato, 1 – Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
Itálie

Distribútor:
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,
Česká republika

Posledná revízia návodu: 07/2022

CE