



# Nosní sprej

# SALIMAR

Zdravotnický prostředek

**Přečtete si, prosím, pečlivě tento návod. Obsahuje důležité informace o správném použití nosního spreje Salimar. Uchovejte jej pro případ, že byste si jej v budoucnu potřebovali přečíst znovu.**

**Složení:** hypertonický roztok mořské vody.

**Obsah balení:** 30 ml.  
Nádobka obsahuje přibližně 300 dávek.

## Co je Salimar?

Nosní sprej Salimar obsahuje hypertonický roztok mořské vody. Zvlhčuje suchou nosní sliznici. Používá se jako pomocná léčba infekční nebo alergické rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin, při nichž zklidňuje podráždění. Používá se též při každodenní hygieně nosu a jeho čištění.

## K čemu se používá?

Šetrný a zároveň účinný nosní sprej je určen pro dospělé, děti a kojence od 1 měsíce:

- pro denní hygienu nosu,
- pro zvlhčování nosní sliznice,
- na zklidnění citlivé nosní sliznice při infekční nebo alergické rýmě,
- na uvolnění nosu a dutin ucpaných v důsledku nachlazení.

## Kdy se nesmí používat?

Nepoužívejte při přecitlivělosti (alergii) na některou ze složek výrobku.

## Způsob použití

Opatrně vsuňte špičku aplikátoru do nosu a aplikátor stiskněte. Po každém použití omyjte aplikátor mýdlem, opláchněte vodou a osušte.

Děti a kojenci od 1 měsíce: 1–2 dávky do obou nosních dírek 2–3× denně.

Dospělí: 1–3 dávky do obou nosních dírek 2–3× denně.

Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, uvedeného na obalu. Nepoužívejte, pokud je poškozený obal.

## Uchovávání:

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Poslední revize návodu: duben 2021



GLOBAL PHARMA CM S.A.  
ul. Berezów 49A, 26-130,  
Suchedniów, Polsko



**Distributor:**  
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,  
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,  
Česká republika





# Nosový sprej SALIMAR

Zdravotnícka pomôcka

**Prečítate si, prosím, starostlivo tento návod. Obsahuje dôležité informácie o správnom použití nosného spreja Salimar. Uchovajte ho pre prípad, ak by ste si ho v budúcnosti potrebovali opäť prečítať.**

**Zloženie:** hypertonický roztok morskej vody.

**Obsah balenia:** 30 ml.  
Nádobka obsahuje približne 300 dávok.

## Čo je Salimar?

Nosový sprej Salimar obsahuje hypertonický roztok slanej vody. Zvlhčuje suchú nosovú sliznicu. Používa sa ako pomocná liečba infekčnej alebo alergickej nádchy a zápalov prínosových dutín, pri ktorých upokojuje podráždenia. Používa sa tiež pri každodennej hygiene nosa a na jeho čistenie.

## Na čo sa používa?

Šetrný a zároveň účinný nosový sprej je určený pre dospelých, deti a dojčatá od 1 mesiaca:

- pre dennú hygienu nosa,
- pre zvlhčovanie nosovej sliznice,
- na upokojenie nosovej sliznice pri infekčnej alebo alergickej nádche,
- na uvoľnenie nosa a dutín upchatých v dôsledku prechladnutia.

## Kedy sa nesmie používať?

Nepoužívajte pri precitlivenosti (alergii) na niektorú zo zložiek výrobku.

## Spôsob použitia

Opatrne vsuňte špičku aplikátora do nosa a aplikátor stlačte. Po každom použití umyte aplikátor mydlom, opláchnite vodou a osušte. Deti a dojčatá od 1 mesiaca: 1–2 dávky do oboch nosných dierok 2–3× denne. Dospelí: 1–3 dávky do oboch nosných dierok 2–3× denne. Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedenom na obale. Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

## Uchovávanie:

Skladujte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Posledná revízia návodu: apríl 2021



GLOBAL PHARMA CM S.A.  
ul. Berezów 49A, 26-130,  
Suchedniów, Polsko



**Distributor:**  
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,  
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,  
Česká republika

