

Ušní sprej

AUDIXOL

Oliva

Zdravotnický prostředek

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento příbalový leták. Obsahuje důležité informace o správném použití ušního spreje Audixol Oliva. Uchovejte jej pro případ, že byste si jej v budoucnu potřebovali přečíst znovu.

Množství účinných složek v 1 dávce (0,1 ml):

Olivový olej 0,09 ml.

Ostatní složky: Máťová silice.

Obsah balení: 30 ml

Co je Audixol Oliva a jak působí?

Audixol Oliva je účinný a bezpečný sprej pro ušní hygienu, který přirozeným způsobem rozpouští a odstraňuje přebytečný ušní maz. Kromě toho zvlhčuje vnější zvukovod, a tak pomáhá udržovat správnou hygienu. Vyčistění a správné zvlhčení zvukovodu pomáhá předcházet hromadění ušního mazu, což může vést k ucpávání a zánětu.

Zdravotnický prostředek navíc obsahuje máťovou silici, která mu propůjčuje příjemnou vůni. Výrobek je určen pro dospělé a děti od 3 měsíců.

K čemu se Audixol Oliva používá?

- Určen k pravidelné hygieně ucha.
- U osob s nadměrnou tvorbou ušního mazu.
- U osob náchylných k onemocnění vnějšího zvukovodu.
- K udržování ušní hygieny u osob používajících naslouchadla z důvodu jejich náchylnosti na tvoření ušního mazuvé zátky.
- Preventivně u plavců a osob věnujících se vodním sportům. Ušní sprej AUDIXOL použitý před kontaktem s vodou vytváří jemný, mastný film na kůži zevního zvukovodu, který omezuje pronikání vody do zvukovodu a zabraňuje udržování vlhkosti ve zvukovodu.

Kdy se nesmí používat?

Nepoužívejte u osob s perforací (proděravěním) ušního bubínku. Nepoužívejte při přecitlivlosti (alergii) na některou ze složek výrobku. Neaplikujte do očí, do nosu nebo do úst. Nepoužívejte u předčasně narozených dětí. O použití u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem.

Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu spojenou s použitím tohoto zdravotnického

prostředku nahláste výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Způsob použití

Před použitím nádobku se sprejem důkladně protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze, zaveďte aplikátor do zvukovodu a několikrát ho stiskněte, dokud se neobjeví tekutina. 1–2 stisknutí aplikujete správnou dávku (obr. 1). Jemně masírujte vnější část ucha (obr. 2). Stejný postup zopakujte u druhého ucha. Na odstranění změkčelo ušního mazu již nepoužívejte tyčinky do uší, pouze nechte obsah vytéct a opatrně otřete.



Obr. 1.



Obr. 2.

Po aplikaci opláchněte špičku aplikátoru tekoucí vodou. Forma spreje zaručuje rovnoměrné rozptýlení a přesné dávkování. Aby si sprej zachoval své vlastnosti, neodstraňujte z něj aplikátor.

Balení výrobku je určeno pro jednu osobu. Z hygienických důvodů nedoporučujeme, aby sprej používalo více lidí. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, uvedeného na obalu. Spotřebujte do 6 měsíců od prvního použití. Nepoužívejte, pokud je poškozený obal.

Dávkování:

U dětí a kojenců starších 3 měsíců šetrně aplikujte po jedné dávce spreje do každého ucha. Doporučujeme sledovat místo aplikace a reakci dítěte po aplikaci. U dospělých 1 až 2 vstříky denně do vnějšího zvukovodu.

Uchovávání:

Skladujte v původním obalu, ve svislé poloze a při teplotě 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Poslední revize návodu: březen 2022

Vysvětlení použitých symbolů:

Číslo šarže

Značka shody se standardy EU

Výrobce

Datum použitelnosti

Skladování při teplotě do 25 °C

Čtete přiložený návod k použití

Global Pharma S.A.
ul. Berezów 49A, 26-130,
Suchedniów, Polsko

Distributor:
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s., Opletalova 921/6,
110 00 Praha 1, Česká republika

Ušný sprej

AUDIXOL

Oliva

Zdravotnícka pomôcka

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento príbalový leták. Obsahuje dôležité informácie o správnom použití ušného spreja Audixol Oliva. Uchovajte ho pre prípad, ak by ste si ho v budúcnosti opäť potrebovali prečítať.

Množstvo účinných zložiek v 1 dávke (0,1 ml):

Olivový olej 0,09 ml.

Ostatné zložky: Mätová silica.

Obsah balenia: 30 ml

Čo je Audixol Oliva a ako pôsobí?

Audixol Oliva je účinný a bezpečný sprej na ušnú hygienu, ktorý prirodzeným spôsobom rozpúšťa a odstraňuje prebytočný ušný maz. Okrem toho zvlhčuje vonkajší zvukovod, a tak pomáha udržiavať správnu hygienu. Vyčistenie a správne zvlhčenie zvukovodu pomáha predchádzať hromadeniu ušného mazu, čo môže viesť k upchávaniu a zápalu. Mätová silica, obsiahnutá v tomto zdravotníckom prostriedku, navyše svojim chladivým účinkom a osviežujúcou vôňou spríjemňuje jeho použitie. Výrobok je určený pre dospelých a deti od 3 mesiacov.

Na čo sa Audixol Oliva používa?

- U osôb s nadmernou tvorbou ušného mazu.
- U osôb náchylných na ochorenie vonkajšieho zvukovodu.
- K udržiavaniu ušnej hygieny u osôb používajúcich audiofóny z dôvodu ich náchylnosti na tvorenie ušnej mazovej zátky.
- Preventívne pre plavcov a osôb venujúcich sa vodným športom. Audixol Oliva použitý pred kontaktom s vodou vytvára jemný, mastný film na koži vonkajšieho zvukovodu, ktorý obmedzuje prenikanie vody do zvukovodu a zabraňuje udržiavanie vlhkosti vo zvukovode.

Kedy sa nesmie používať?

Nepoužívajte u osôb s perforáciou (prederavenie) ušného bubienka. Nepoužívajte pri precitlivenosti (alergii) na niektorú zo zložiek výrobku. Neaplikujte do očí, do nosa alebo do úst. Nepoužívajte u predčasne narodených detí. O použití u dojčiat a malých detí sa poraďte s lekárom. Akúkoľvek závažnú nežiaducu príhodu spojenú s použitím tejto

zdravotníckej pomôcky nahláste výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Spôsob použitia:

Pred použitím nádobku so sprejom dôkladne pretrepte. Držte nádobku vo zvislej polohe, zaveďte aplikátor do zvukovodu a niekoľkokrát ho stlačte, kým sa neobjaví tekutina. 1–2 stlačeními aplikujte správnu dávku (obr. 1). Jemne masirujte vonkajšiu časť ucha (obr. 2). Rovnaký postup zopakujte pri aplikácii do druhého ucha. Na odstránenie zmäknutého ušného mazu už nepoužívajte tyčinky do uší, len nechajte obsah vytečť a opatrne utrite.



Obr. 1.



Obr. 2.

Po aplikácii opláchnite špičku aplikátora tečúcou vodou. Forma spreja zaručuje rovnomerné rozptýlenie a presné dávkovanie. Aby si sprej zachoval svoje vlastnosti, neodstraňujte z neho aplikátor.

Balenie výrobku je určené pre jednu osobu. Z hygienických dôvodov neodporúčame, aby sprej používalo viac ľudí. Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedeného na obale. Spotrebujte do 6 mesiacov od prvého použitia. Nepoužívajte ak je poškodený obal.

Dávkovanie:

U detí a dojčiat starších ako 3 mesiace šetne aplikujte po jednej dávke spreja do každého ucha. Odporúčame sledovať miesto aplikácie a reakciu dieťaťa po aplikácii. U dospelých 1 až 2 vstreky denne do vonkajšieho zvukovodu.

Uchovávanie:

Skladujte v pôvodnom obale, vo zvislej polohe a pri teplote 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Posledná revízia návodu: Marec 2022

Vysvetlenie použitých symbolov:

- Číslo šarže Značka zhody so štandardmi EÚ Výrobca
- Dátum použiteľnosti Skladovanie pri teplote do 25 °C Čítajte priložený návod na použitie

Global Pharma S.A.
ul. Berezów 49A, 26-130,
Suchedniów, Polsko

Distribútor:
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s., Opletalova 921/6,
110 00 Praha 1, Česká republika