

# Premium OcuSWISS® 0,3 % HA

Zvlhčující oční kapky

Zdravotnický prostředek



**SWISS-MED**  
Pharmaceuticals

**Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití!**

Zvlhčující a osvěžující oční roztok s kyselinou hyaluronovou 0,30 %. Neobsahuje konzervační látky.


## K čemu se používá?

- Zvlhčuje a osvěžuje suché a unavené oči.
- Vhodné při narušení slzného filmu, které není následkem úrazu nebo onemocnění oka.
- Vhodné při podráždění oka vlivem okolního prostředí (vítr, prach, klimatizace, suchý a znečištěný vzduch atd.).
- Vhodné při zátěži očí při práci s počítačem, nepříznivých světelných podmínkách, nočním řízení atd.
- Vhodné při dlouhodobém nošení kontaktních čoček.
- Může se též používat s nasazenými kontaktními čočkami.

## Návod k použití

Kápněte jednu nebo dvě kapky do obou očí, podle potřeby jednou či vícekrát denně nebo podle doporučení očního lékaře.

**Uživatelé kontaktních čoček:** Kápněte 2–3 kapky na čočku před jejím použitím a po použití. Podle potřeby můžete také několikrát denně nakapat roztok na čočky nasazené do očí.

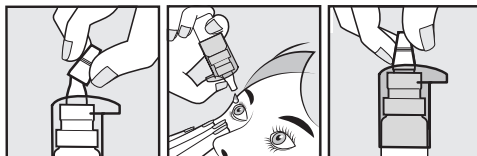

## Upozornění


- Při nepříjemných pocitech v oku přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte při přecitlivělosti nebo alergii na kteroukoliv složku výrobku.
- Nedotýkejte se kapátkem povrchu oka.
- Chraňte před přímými zdroji tepla a uchovávejte na suchém místě při teplotě 5–35 °C.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po datu spotřeby, vyznačeném na obalu.
- Nepoužívejte déle než 90 dní od prvního otevření.
- Po každém použití dobře lahvičku uzavřete.
- Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozená.

## Složení

Kyselina hyaluronová 0,30 %, edetan sodný, isotonický pufovaný roztok pH 7,2.

## Velikost balení

10 ml

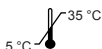

STERILE A

Distributor:  
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,  
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,  
Česká republika

Poslední revize návodu: 10/2019

 **Omisan** farmaceutici  
via Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy

**CE**  
0051

# Premium OcuSWISS® 0,3 % HA

Zvlhčujúce očné kvapky

Zdravotnícka pomôcka



**SWISS-MED**  
Pharmaceuticals

Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na použitie.

Zvlhčujúci a osviežujúci očný roztok s kyselinou hyaluronovou 0,30 %. Neobsahuje konzervačné látky.

## Na čo sa používa?


- Zvlhčuje a osviežuje suché a unavené oči.
- Vhodné pri narušení slzného filmu, ktoré nie je následkom úrazu alebo ochorenia oka.
- Vhodné pri podráždení oka vplyvom okolitého prostredia (vietor, prach, klimatizácia, suchý a znečistený vzduch atď.).
- Vhodné pri záťaži očí pri práci s počítačom, nepriaznivých svetelných podmienkach, nočnom šoférovaní atď.
- Vhodné pri dlhodobom nosení kontaktných šošoviek.
- Môže sa tiež používať s nasadenými kontaktnými šošovkami.

## Návod na použitie

Kvapnite jednu alebo dve kvapky do obidvoch očí, podľa potreby raz alebo viackrát denne alebo podľa odporúčania očného lekára.

**Používatelia kontaktných šošoviek:** Kvapnite 2–3 kvapky na šošovku pred jej použitím a po použití.

Podľa potreby môžete tiež niekoľkokrát denne nakvapkať roztok na šošovky nasadené na očiach.

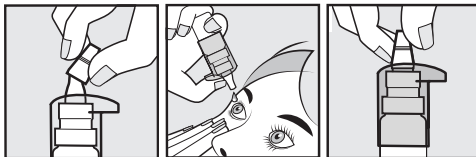

## Upozornenie

- Pri nepríjemných pocitoch v oku prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte pri precitlivencosti alebo alergii na niektorú zo zložiek výrobku.
- Nedotýkajte sa kvapkadlom povrchu oka.
- Chráňte pred priamymi zdrojmi tepla a uchovávajte na suchom mieste pri teplote 5–35 °C.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Neužívajte vnútorne.
- Nepoužívajte po dátume spotreby, vyznačenom na obale.
- Nepoužívajte dlhšie ako 90 dní od prvého otvorenia.
- Po každom použití dobre uzatvorte fľašku.
- Nepoužívajte, ak je fľaška poškodená.

## Zloženie

Kyselina hyaluronová 0,30 %, edetan sodný, izotonický pufovaný roztok pH 7,2.

## Veľkosť balenia

10 ml



STERILE A

Distribútor:  
SWISS MED Pharmaceuticals, a. s.,  
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,  
Česká republika

Posledná revízia návodu: 10/2019

**Omisan** farmaceutici  
via Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy

**CE**  
**0051**